

Accès patient au menu Info Expert

Le menu info expert est un menu accessible au patient afin de pouvoir vérifier les statistiques de la thérapie sans pour autant pouvoir modifier les paramètres de réglages. Très utile dans le cas où vous désirez avoir des informations (compteur turbine, version Firmware...) avec votre patient au téléphone sans prendre le risque qu'il puisse changer les réglages de sa thérapie. Via cette fonctionnalité, votre patient peut également avoir accès à ses résultats thérapeutiques comme son IAH et la fuite.

Condition préalable : L'appareil est en mode veille.

1. Appuyez sur la touche Menu 








Le menu Patient s'ouvre.



Maintenir la touche softSTART  enfoncée.

Le menu Info Expert s'ouvre.

Parcourir les menus

Touche de fonction	Description
	Avancer dans le menu
	Revenir en arrière dans le menu
	Augmenter la valeur/modifier la période affichée
	Réduire la valeur/modifier la période affichée
	Confirmer la valeur
	Refuser la valeur
	Quitter le menu. Revenir à l'écran de démarrage.

CE 0197

**Löwenstein Medical
Technology GmbH + Co. KG**
Kronsaalsweg 40
22525 Hamburg, Germany
T: +49 40 54702-0
F: +49 40 54702-461
www.loewensteinmedical.de

mbh-10031
WM 68222a FR · 12/2017



WM 68222a

Mode d'emploi abrégé destiné au personnel médical

prisma SMART prisma SOFT



- 1 Touche 
- 2 Touche 
- 3 Touche marche/arrêt
- 4 Touche Menu
- 5 Touche softSTART





Ce document ne remplace pas le mode d'emploi.
Les informations complètes figurent dans le mode d'emploi.


LÖWENSTEIN
medical


LÖWENSTEIN
medical




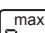




Menu Réglages Expert

- Appuyer simultanément sur la touche Menu  et la touche softSTART  et les maintenir enfoncées.



Le menu Info Expert s'ouvre.



Pour ouvrir le menu Réglages : appuyer sur  (touche ).


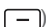
Paramètres	Description	
Mode 	Mode CPAP : PPC constante Mode APAP : PPC autopilotée	
Mode CPAP : Pression CPAP 	Réglage de la pression constante.	
Mode APAP :	Pression APAP minimale 	Réglage de la pression minimale en mode autopilotée.
	Pression APAP maximale 	Réglage de la pression maximale en mode autopilotée.
	Dynamique APAP  	Il est possible de choisir entre deux réglages pour la commande APAP : <i>Std (standard)</i> : algorithme APAP connu : les apnées et les hypopnées peuvent être traitées de manière rapide et fiable. L'appareil réagit aux ronflements, aux limitations de débit et aux RERA autonomiques. <i>dYn (dynamique)</i> : réaction plus vive et plus rapide aux événements obstructifs mineurs comme les ronflements et les limitations de débit. La respiration se normalise plus rapidement.
Niveau softPAP 	Le confort respiratoire softPAP est approprié pour les patients qui ressentent une difficulté à expirer contre la pression. La pression s'abaisse à l'expiration pour faciliter la respiration et remonte avant la fin de l'expiration afin de garder les voies aériennes supérieures ouvertes. 2 niveaux d'aide : softPAP1 (aide expiratoire faible), softPAP2 (aide expiratoire plus importante) Commuter le softPAP sur  pour désactiver cette fonction.	








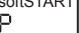


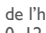
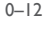
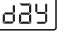



Menu Info Expert





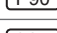
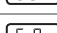

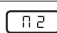
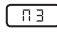
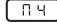
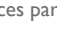
- Appuyer simultanément sur la touche Menu  et la touche softSTART  et les maintenir enfoncées.

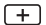

Le menu Info Expert s'ouvre.

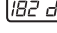


Pour ouvrir le menu Info : appuyer sur  (touche ).

Paramètres	Description
Verrouillage softPAP 	 : le patient peut modifier son niveau de softPAP.  : le patient ne peut pas modifier son niveau de softPAP.
autoSTART 	Si l'autoSTART est activé () , l'appareil peut être mis en marche par une respiration (> 0,5 cm H ₂ O) dans le masque et se coupe automatiquement après 5 secondes lorsque le masque est retiré. Commutez l'autoSTART sur  pour désactiver cette fonction.
Durée softSTART 	Intervalle de temps au cours duquel la pression de ventilation augmente pour atteindre la pression thérapeutique dans le cadre du softSTART.
Pression softSTART 	Pression de démarrage du softSTART.
Heure 	Réglage de l'heure.
Format de l'affichage du temps 	Modification du format d'affichage de l'heure : 0-24 heures () ou 0-12 heures () .
Date 	Réglage du jour du mois.
Date 	Réglage du mois.
Date 	Remise à zéro des l'année.
Supprimer les données 	Réglage de compteurs N1, N2, N3 ainsi que des données statistiques de l'appareil. Les réglages thérapeutiques seront conservés.

Paramètres	Description
	Heures d'utilisation (N3)
	La durée indiquée est la durée moyenne de la thérapie (sans artéfact et avec masque ouvert) par jour pour la période indiquée*
	AHI = IAH totale moyenne pour la période* choisie
	Moyenne de la fuite pour la période* choisie
	Pression au 90ème centile sur la période choisie
	Respiration Cheyne-Stokes
	Version du Firmware
	Heures de thérapie sans artéfact et avec masque ouvert
	Heures de thérapie avec humidificateur (sans artéfact et avec masque ouvert)
	Heures de thérapie avec artéfact et masque ouvert
	Compteur turbine

* Avec ces paramètres, il n'est pas possible d'afficher des périodes supplémentaires en utilisant les touches  et  :

	Dernier jour
	7 derniers jours
	28 derniers jours
	182 derniers jours
	366 derniers jours

Les données ne s'affichent que si elles existent réellement dans l'appareil. Une journée de traitement commence et se termine à midi (12h00). Les données enregistrées de minuit à 12h00 sont attribuées au jour calendrier précédent.